

MERCOTECH DESINFETANTE BAC PLUS

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

Finalidade de uso:

Mercotech Desinfetante BAC Plus associa sinérgicamente seus componentes possuindo ampla eficácia bactericida frente a bactérias gran-positivas, gran-negativas. É um desinfetante concentrado de primeiríssima linha, com altíssima diluição, sendo que 1 (um) litro do produto faz 500 litros de Desinfetante Hospitalar. Desinfetante desenvolvido exclusivamente para a utilização hospitalar e em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde. Destinado a desinfecção de pisos, paredes, mobiliários e superfícies fixas em geral. Atende todas as áreas hospitalares, exceto SND. Testes de eficácia realizados em laboratórios acreditados Reblas:

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae carbapenemase, Staphylococcus MRSA, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella choleraesuis, Acinetobacter baumannii, Aspergillus niger, Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes, Enterococcus faecium VRE, Clostridium difficile.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Incolor
ODOR:	Inodoro
pH (Puro):	6,0 a 8,0
DENSIDADE (25°C):	0,94 a 1,0

INSTRUÇÕES DE USO:

Para desinfecção geral diluir 1 parte de produto em até 499 partes de água.

Para desinfecção de bactérias multirresistentes, diluir 1 parte de produto em até 199 litros de água. Tempo de contato: 10 minutos.

Realizar varredura húmida ou limpeza com sabão ou detergente com auxílio de rodo ou mop. Após a limpeza aplicar o desinfetante sobre as áreas deixando o tempo necessário para ação do produto. Se necessário realizar enxágue e secagem.

COMPOSIÇÃO:

Cloreto de dialquil-dimetil benzil amônio, cloridrato de polioxametileno biguanida, sequestrantes, conservante e veículo.

PRINCÍPIO ATIVO:

Octil decil dimetil cloreto de amônio + didecil dimetil cloreto de amônio: ≤ 38,0% e cloridrato de polioxametileno biguanida ≤ 4,0%.

Mercotech Desinfetante BAC PLUS trás em sua formulação inovadora, dois dos mais seguros e eficientes princípios ativos do mercado, o quaternário de amônio de quinta geração associado à PHMB. Esses princípios ativos agem sinérgicamente ampliando o espectro de ação antimicrobiano do produto.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

Cód: 05/LD

PRECAUÇÕES DE USO:

• **CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

• **PRECAUÇÕES:** CUIDADO! Irritante para olhos, pele e mucosas. Não ingerir. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou rótulo do produto. Não inalar. Lave as mãos após o uso do produto. Manter ao abrigo da luz.

• **ADVERTÊNCIA:** Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Usar luvas e óculos para sua aplicação. Não misturar com outros produtos.

Produto Registrado na ANVISA/MS:

Nº 327470140

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,19 kg)

Bombona plástica de 20L (21,1 kg)

Prazo de Validade: 24 meses

Responsável Técnico:

Miller Moraes de Oliveira

CRF/MG: 15252

Revisão X
09/11/2018